

Messpunkte Umfangmaße



Umfang cA

Vorfußumfang auf Höhe der Zehengrundgelenke



Umfang cY

Diagonalmaß Ferse-Spann
(in maximaler Dorsalextension messen)



Umfang cB

Fesselumfang: Schlankste Stelle am Unterschenkel



Umfang cB¹

Unterschenkelumfang auf Höhe Wadenmuskel-
ansatz zu Übergang Achillessehne



Umfang cC

Wadenumfang: Stärkste Stelle Wade



Umfang cD

Umfang auf Höhe Wadenbeinköpfchen/
Schienbeinkopf (ca. 3 cm unter Kniekehle)



Umfang cE

Knieumfang:
Stärkste Stelle am Kniegelenk
bzw. Mitte Kniescheibe



Umfang cF

Umfang Mitte Oberschenkel



Umfang cG

Oberschenkelumfang:
Stärkste Stelle am Oberschenkel
bzw. 3 cm unterhalb der Leiste



Umfang cK

Hüftumfang: Umfang Becken ober-
halb Trochanter Spitze bzw.
direkt oberhalb des Schambeins



Umfang cH

Leibumfang: Stärkste Stelle am
Bauch zwischen Becken und Taille




Umfang cT

Taillenumfang: In der Taille (bzw.
auf Höhe des gewünschten oberen
Abschlusses der Strumpfhose)

Hier geht es
zum Video:

Maßnahmen von rundgestrickten
Kompressionsstrümpfen

<https://s.bort.com/MP8001>

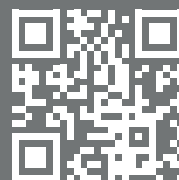

Messpunkte Längenmaße



Länge lZ

Gesamte Fußlänge für geschlossene
Fußspitze: Fersenrücken bis Zehenspitze




Länge lA

Fußlänge für offene Fußspitze:
Fersenrücken bis Großzehengrundgelenk




Länge lB

Fußsohle bis Fessel

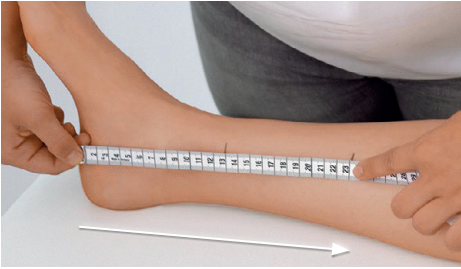


Länge lB1

Fußsohle bis Wadenmuskelansatz

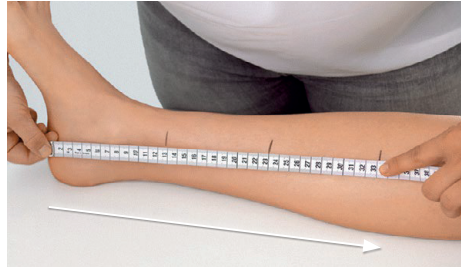

Länge lC

Fußsohle bis stärkste Stelle Wade

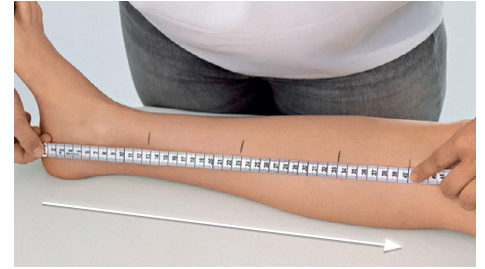

Länge lD

Fußsohle bis Wadenbeinköpfchen/Schienbeinkopf



Länge lE

Fußsohle bis stärkste Stelle
Kniegelenk (Mitte Kniescheibe)



Länge lF

Fußsohle bis Mitte Oberschenkel



Länge lG

Fußsohle bis Gesäßfalte bzw.
stärkste Stelle Oberschenkel



Länge lK

Fußsohle bis Trochanterspitze
bzw. Oberkante Schambein



Länge lH

Fußsohle bis stärkste Stelle
am Bauch



Länge lT

Fußsohle bis Taille bzw. dem
gewünschten oberen Abschluss
der Strumpfhose



Leibteillänge vorne

Schritt vorne (Leistenbeuge) bis
Taille (bzw. dem gewünschten oberen
Abschluss der Strumpfhose)



Leibteillänge hinten

Gesäßfalte bis Taille (bzw. dem
gewünschten oberen Abschluss
der Strumpfhose)