

BORT StabiloPro Knieorthese offene Form




Gebrauchsanweisung

REF 182 300



BORT. Das Plus an Ihrer Seite.

D182300I2025-011011 DE | Rev. 01

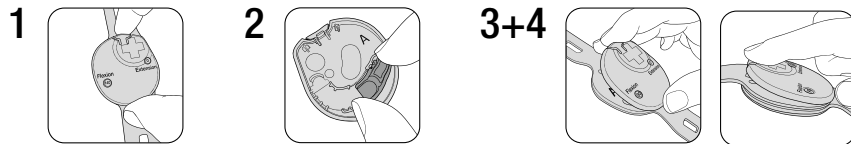

DE BORT StabiloPro Knieorthese offene Form

Vielen Dank für das Vertrauen in ein Medizinprodukt der BORT GmbH. Bitte lesen Sie die vorliegende Gebrauchsanweisung sorgfältig durch. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Fachhandel, von dem Sie dieses Medizinprodukt erhalten haben.

Zweckbestimmung

Bei diesem Medizinprodukt handelt es sich um eine Orthese zur Unterstützung der physiologischen Führung des Kniegelenks im 4-Punkt-Stabilisierungs-Prinzip mit zirkulären Klettverschlusszügen und seitlichen Führungsschienen mit im Bewegungsumfang einstellbaren Gelenken.

Indikationen

Mittlere Bandinstabilität des Kniegelenks, Meniskusverletzungen, Nachsorge bei arthroskopischen Eingriffen am Knie, chronische, postoperative und posttraumatische Reizzustände.

Kontraindikationen

Thrombosegefahr, hochgradige Varikosis, periphere arterielle Verschlusskrankheit (PAVK), Lymphabflussstörungen auch unklare Weichteilschwellungen körperform des angelegten Hilfsmittels, Empfindungs- und Durchblutungsstörungen der versorgten Körperregion, Erkrankungen der Haut im versorgten Körperabschnitt, Latexallergie.

Anwendungsrisiken / Wichtige Hinweise

Dieses Medizinprodukt ist ein verordnungsfähiges Produkt. Sprechen Sie Anwendung und Dauer mit Ihrem verordnenden Arzt ab. Die Auswahl der geeigneten Größe und eine Einweisung erfolgt durch das Fachpersonal, von dem Sie das Medizinprodukt erhalten haben.

- Medizinprodukt vor radiologischen Untersuchungen ablegen
- bei Taubheitsgefühl Medizinprodukt lockern oder ggf. abnehmen
- bei anhaltenden Beschwerden den Arzt oder Fachhandel aufsuchen
- Medizinprodukt indikationsgerecht einsetzen
- gleichzeitige Nutzung anderer Produkte nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt
- keine Änderungen am Produkt vornehmen
- nicht auf offenen Wunden tragen
- nicht verwenden bei Unverträglichkeiten gegen eines der verwendeten Materialien
- kein Wiedereinsatz – dieses Hilfsmittel ist zur Versorgung von nur einem Patienten bestimmt
- während der Tragedauer der Orthese: keine lokale Anwendung von Cremes oder Salben im Bereich des angelegten Hilfsmittels – kann Material zerstören

Anziehanleitung

Die Orthese kann direkt auf der Haut oder über der Kleidung getragen werden. Achten Sie auf Faltenbildung der Kleidung im Bereich der Orthese, diese ist zu vermeiden, denn sie kann zu Druckstellen führen.

Wichtiger Hinweis: Die Anpassung der Orthese darf nur durch Fachpersonal erfolgen. Vor dem Anlegen der Orthese müssen die seitlichen Gelenkschienen durch eine Fachkraft an die vorliegende Beinkontur angepasst werden. Um die Aluminiumschienen anzupassen, entnehmen Sie diese aus den Schienentaschen. Der Zugang der Schienentaschen befindet sich auf der Innenseite der Orthese. Die Schiene kann durch den vorhandenen Schlitz entnommen werden. Formen Sie die Schienen mittels Kaltverformung an die seitlichen Beinkonturen an (ggf. Schränkeisen benutzen). Abschließend schieben Sie die Gelenkschienen wieder in die Gelenktaschen ein. Die blauen Extensionsbegrenzungen müssen hierbei in Richtung der Patellaussparung zeigen.

Tipp: Zum Anlegen zunächst die Klettbänder sowie die Orthese öffnen und das Bein in die Orthese legen. Positionieren Sie die Orthese so, dass die Patellaussparung die Kniescheibe umschließt. Anschließend die Orthese und Klettverschlüsse unter Zug schließen, vermeiden Sie hierbei Einschränkungen.

Einstellen der Extension- / Flexionsbegrenzung:

Bei Bedarf kann es notwendig sein den Bewegungsumfang der Orthese zu limitieren. Die Extension ist werkseitig auf 0° eingestellt, die Flexion ist nicht limitiert.

1 Entfernen Sie die äußere Abdeckung des Gelenks. Hierzu heben Sie die Lasche der Gelenkabdeckung an und schieben die Gelenkabdeckung nach unten weg.

2 Wichtig: Die Extensions-/Flexionsbegrenzungen werden in die Gelenkabdeckung eingesetzt, nicht direkt in den Gelenkkörper.

Die Gelenke und die Anschlagätze sind mit „A“ und „B“ gekennzeichnet. Entfernen Sie den vorhandenen Anschlag aus der Gelenkabdeckung und entnehmen Sie den benötigten Anschlag aus den beiliegenden Anschlagätzen, die Winkelgrade sind auf den Anschlagkeilen vermerkt. Extensionskeile (blau) sind mit „E“, Flexionskeile (grau) sind mit „F“ beschriftet. Setzen Sie den benötigten Anschlag in die Gelenkabdeckung ein und drücken diesen an.

Achtung: Bewahren Sie die Einsätze mit der Beschriftung 0° (blau) und 140° (grau) unbedingt auf und setzen Sie diese nach Erlangung von freier Bewegung wieder in die Gelenkabdeckung ein. Die beiden Einsätze dienen zur Abdeckung der runden Durchbrüche der Gelenkabdeckung.

3+4 Abschließend bringen Sie die Gelenkabdeckung wieder an. Haken Sie hierzu die Gelenkabdeckung in die Aufnahme im unteren Bereich des Gelenks ein und drücken diese mit sanftem Druck nach unten bis sie einrastet. Je nachdem welchen Anschlag Sie eingesetzt haben, müssen sie zur Montage der Gelenkabdeckung den Beugewinkel des Gelenks entsprechend angleichen.

Beispiel: Sie haben einen 10° Extensionsanschlag in die Gelenkabdeckung eingesetzt, also muss das Gelenk zur Montage der Abdeckung leicht gebeugt sein. Folgende Limitierungen stehen zur Verfügung:

- Extension: 0°, 5°, 10°, 15°, 20°, 25°, 30°
- Flexion: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°

Ablegen

Zum Ablegen des Hilfsmittels die zirkulären Klettbänder öffnen und folgend die Klettverschlüsse der Orthese öffnen. Anschließend die Orthese vom Bein nehmen. Schließen Sie alle Klettverschlüsse, um Beschädigungen, z. B. an anderen Kleidungsstücken, zu vermeiden.

Materialzusammensetzung

Polyamid (PA), Polyurethan (PUR), Elasthan (EL), Viskose (CV), Baumwolle (CO)
Die genaue Materialzusammensetzung entnehmen Sie bitte dem eingenahten Textiletiket.

Das Produkt enthält Latex und kann allergische Reaktionen auslösen.

Reinigungshinweise

Vor dem Waschen Gelenkschienen herausnehmen und Klettverschlüsse schließen, um Beschädigung anderer Wäschestücke zu vermeiden.

Schonwaschgang 30 °C Nicht bleichen Nicht im Wäschetrockner trocknen Nicht bügeln Nicht chemisch reinigen
Keinen Weichspüler verwenden. In Form ziehen und an der Luft trocknen.

Gewährleistung

Für das erworbene Produkt gelten die gesetzlichen Bestimmungen des Landes, in dem Sie das Produkt bezogen haben. Bitte wenden Sie sich an Ihren Fachhandel, sollten Sie einen Gewährleistungsfall vermuten. Bitte das Produkt vor Einreichung eines Gewährleistungsfalles reinigen. Wurden beiliegende Hinweise der Gebrauchsanweisung nicht ausreichend beachtet, so kann die Gewährleistung beeinträchtigt werden bzw. entfallen. Ausgeschlossen ist eine Gewährleistung bei nicht indikationsgerechter Anwendung, Nichtbeachtung der Anwendungsrisiken, -hinweise sowie eigenmächtig vorgenommenen Änderungen am Produkt.

Nutzungsdauer / Lebensdauer des Produkts

Die Lebensdauer des Medizinprodukts wird durch den natürlichen Verschleiß bei sach- und anwendungsgemäßem Umgang bestimmt.

Meldepflicht

Kommt es bei der Anwendung des Medizinproduktes zu einer schwerwiegenden Verschlechterung des Gesundheitszustandes, dann melden Sie dies Ihrem Fachhändler oder uns als Hersteller sowie dem BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte).

Unsere Kontaktdaten entnehmen Sie der vorliegenden Gebrauchsanweisung. Die Kontaktdaten der zuständigen nationalen Behörde Ihres Landes finden Sie unter folgendem Link: www.bort.com/md-eu-kontakt.

Entsorgung

Nach Nutzungsende muss das Produkt entsprechend örtlicher Vorgaben entsorgt werden.

Konformitätserklärung

Wir bestätigen, dass dieses Produkt den Anforderungen der VERORDNUNG (EU) 2017/745 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES entspricht. Die aktuelle Konformitätserklärung finden Sie unter folgendem Link: www.bort.com/konformitaet

Stand: 01.2025

Medizinprodukt | Einzelner Patient – mehrfach anwendbar

