



Tack för att du valt en medicinteknisk produkt från BORT GmbH. Läs de medföljande bruksanvisningarna noggrant. Om du har några frågor, vänligen kontakta din läkare eller den specialiståterförsäljare där du köpte denna medicintekniska produkt.

Användningssyfte

Denna medicintekniska produkt är ett höftskydd som minskar kraften /dämpar stöten mot lårbenshalsen vid ett fall.

Indikationer

Benägenhet för fallolyckor av olika anledningar.

Kontraindikationer

Os specifika mjukvävnadssvullnader, sensoriska störningar och cirkulationsstörningar kring den behandlade kroppsdel, hudsjukdomar i den behandlade kroppsdel.

Risker vid användning/Viktiga anmärkningar

Den specialistpersonal som gett dig den medicintekniska produkten väljer lämplig storlek och handleder dig i produktens användning.

- Ta bort den medicintekniska produkten före radiologiska undersökningar.
- I händelse av domningar lossar du på den medicintekniska produkten och tar bort den vid behov.
- Vid ihållande besvär kontaktar du läkaren eller specialiståterförsäljaren.
- Använd den medicintekniska produkten i enlighet med terapeutiska behov.
- Använd inga andra produkter samtidigt utan att ha konsulterat din läkare.
- Gör inga ändringar i produkten.
- Bär inte skyddet ovanpå öppna sår.
- Använd inte vid intolerans mot något av de material som använts i produkten.
- Återanvänd inte. Detta medicinska hjälpmedel är endast avsett för behandling av en enskild patient.
- Använd inga krämer eller salvor på eller runt skyddet eftersom de kan förstöra materialet.

Anvisningar för användning

Sätt på höftskyddet på samma sätt som ett par byxor. Fickorna som är integrerade i byxorna säkerställer att skyddskuddarna sitter rätt.

För att ta bort skyddskuddarna, vänd byxorna "ut och in". Lägg sedan den övre fliken på skyddsfickan bakom skyddskudden och dra ut skyddskudden ur den nedre delen av fickan. För att använda skyddet, vik den övre fliken utåt för att skjuta in skyddskudden med den breda sidan först i den nedre delen av fickan och lägg slutligen fliken över den smala änden av skumkudden. Observera att den konkava sidan av skyddskudden ska peka mot kroppen.

Ta bort skyddet

Ta bort höftskyddet på samma sätt som ett par byxor.

Materialsammansättning

Bomull (CO)

Den exakta materialsammansättningen anges på den insydda textiletiketten.

Rengöring

Omtålig tvätt 60 °C Får ej blekas Får ej torkas i torktumlare Stryk inte Ingen kemtvätt.

Ta bort skyddskuddarna före tvätt. Byxorna kan tvättas i 60 °C i tvättmaskinen med milda tvättmedel. Använd inte sköljmedel. Sträck ut skyddet så att det återfår sin ursprungliga form och torka i frisk luft. Tvätta skyddskuddarna för hand i ljummet vatten och med milda tvättmedel.

Garanti

De lagbestämmelser som gäller i det land där du skaffat produkten gäller för den köpta produkten. Kontakta din specialiståterförsäljare om du vill göra ett garantianspråk. Rengör produkten innan du skickar in ett garantianspråk. Om de bifogade bruksanvisningarna inte har följts på korrekt sätt kan garantin begränsas eller upphävas. Garantin gäller inte en för indikationen olämplig användning, ett otillräckligt beaktande av användningsriskerna och anvisningarna samt otillåtna modifieringar av produkten.

Användningstid/Produktens livslängd

Den medicintekniska produktens livslängd fastställs enligt dess naturliga slitage om den behandlas på lämpligt sätt och enligt rekommendationerna.

Informationskyldighet

Om ditt hälsotillstånd försämrats avsevärt när du använder den medicintekniska produkten är du skyldig att underrätta specialiståterförsäljaren eller oss som tillverkare samt läkemedels- och produkttillsynsmyndigheten (MHRA) om detta. Du hittar vår kontaktinformation i dessa bruksanvisningar. Du hittar kontaktinformationen för ditt eget lands nationella myndighet på följande länk: www.bort.com/md-eu-contact.

Avfallshantering

Efter avslutad användning ska produkten kasseras i enlighet med lokala krav.

Försäkran om överensstämmelse

Vi bekräftar att denna produkt överensstämmer med kraven i EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2017/745. Du hittar den aktuella försäkran om överensstämmelse på följande länk: www.bort.com/conformity

Status: 10.2023

Medicinteknisk produkt | För enskild patient – flergångsanvändning

