

BORT Piriformis-Pelotte für CoxaPro Hüftorthese




Gebrauchsanweisung

REF 991 126



BORT. Das Plus an Ihrer Seite.

D991126I2023-10I001 DE I Rev. 01

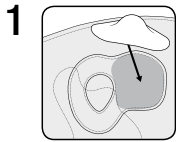

Vielen Dank für das Vertrauen in ein Produkt der BORT GmbH. Bitte lesen Sie die vorliegende Gebrauchsanweisung sorgfältig durch. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Fachhandel von dem Sie dieses Produkt erhalten haben.

Zweckbestimmung

Optionale Pelotte zur Triggerpunktmassage des Piriformis-Muskels

Kontraindikationen

Nur in Verbindung mit BORT CoxaPro Hüftorthese. Thrombosegefahr, hochgradige Varikosis, periphere arterielle Verschlusskrankheit (PAVK), Lymphabflussstörungen auch unklare Weichteilschwellungen körperform des angelegten Hilfsmittels, Empfindungs- und Durchblutungsstörungen der versorgten Körperregion, Erkrankungen der Haut im versorgten Körperabschnitt.

Materialzusammensetzung

Pelotten-Bezug: 100 % Polyamid

Pelotten-Material: 100 % Polyurethan

Gebrauchsanleitung

Die Piriformis-Pelotte wird im inneren Klettbereich des Orthesengestrics befestigt, wobei die deckungsgleiche Form der Velourfläche zur Pelotte als Positionierhilfe dient (siehe Bild 1).

Reinigungshinweise

Bei Bedarf kann der Pelottenbezug mit Seife und lauwarmem Wasser (30°) gereinigt werden. Lassen Sie die Pelotte an der Luft trocknen.

Nutzungsdauer / Lebensdauer des Produkts

Die Lebensdauer des Medizinprodukts wird durch den natürlichen Verschleiß bei sach- und anwendungsgemäßigem Umgang bestimmt.

Entsorgung

Nach Nutzungsende muss das Produkt entsprechend örtlicher Vorgaben entsorgt werden.

Stand: 10.2023

Einzelner Patient – mehrfach anwendbar

