

Anziehanleitung

REF 121 100



1 Zunächst die verletzte Hand wie abgebildet in die Schaumstoffhalbschale legen und mittels der drei schmalen Klettbänder sicher in der Schale positionieren. Dann das auf Höhe des Oberarmes angebrachte Band (1) von hinten über die Schulter führen. Das Band durch den D Ring beim Daumen fädeln, zurückführen und ankletten. Das zweite Band (2) auf Taillenhöhe um den Rücken führen und durch den D-Ring beim kleinen Finger fädeln und verschließen. Band (1) und Band (2) so anlegen und evtl. nachziehen, dass die Orthese straff am Körper anliegt.

2 Tipp: Auf unserer Homepage oder über den produktnahen QR-Code finden Sie unser Video zum Anlegevorgang.