

Der **BORT Spezial-Hautkleber** ist eine spezielle wasserlösliche Klebelotion für die Befestigung von medizinischen Kompressionsversorgungen an Armen und Beinen.

Inhaltsstoffe: Isopropyl Alcohol, Aqua, PVP, Glycerin, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin.

**Haltbarkeit, Gewährleistung, Transport und Lagerung, Entsorgung:**



Bitte schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung, Hitze und Feuchtigkeit. Wir empfehlen die Aufbewahrung bei Raumtemperatur. Das Produkt sollte stets gut verschlossen, stehend gelagert und transportiert werden.

**REF** 599080

Pos.Nr. 17.06.07.0013 | PZN 13059957  
UFI QJ8N-KOWN-R00W-KXN7

**UDI** 111305995764

**Wi** **Weitere Hinweise** auf der Innenseite des Etiketts beachten oder im Sicherheitsdatenblatt unter [ga.bort.com](http://ga.bort.com). Bei Unfall oder Unwohlsein erhalten Sie 24h unter der Gift-notrufnummer +49 (0) 761 19240 Auskunft.



# Spezial-Hautkleber

für BORT Aktiven®  
Medizinische  
Kompressionsstrümpfe



Besonders  
hautverträglich



**BORT. Das Plus an Ihrer Seite.®**



Vertrieb durch:

**BORT GmbH**

Am Schweizerbach 1, D-71384 Weinstadt  
[www.bort.com](http://www.bort.com) | +49 (0) 7151 99200-0

**CH REF** Importeur/Importateur/Importatore  
**Orthosan AG**

Freiburgstrasse 634 | CH-3172 Niederwangen b. Bern | [www.orthosan.ch](http://www.orthosan.ch)

**H** Hersteller: Ultrana GmbH  
Mackstraße 112, D-88348 Bad Saulgau,  
[www.ultrana.de](http://www.ultrana.de) | +49 (0) 7581 2007298

**Gefahr:** Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Enthält: Isopropyl alcohol.




60 ml e



**Anwendung:** Vor der Anwendung muss die Haut trocken und sauber sein, alte Klebereste von einer vorherigen Anwendung sollten von Arm und Bein sowie von dem Kompressionsstrumpf entfernt werden.

Ziehen Sie die medizinische Kompressionsversorgung gemäß der Gebrauchsanweisung des Herstellers der Kompressionsversorgung an. Legen Sie den Rand nach unten um, und tragen Sie den Klebstoff mit der Roll-on Kugel auf die freigelegte Haut auf (s. Abb. **A** und Abb. **B**). Ein einmaliges Auftragen der Klebelotion rund um das Bein oder den Arm ist ausreichend. Klappen Sie anschließend den Strumpftrand wieder hoch und drücken Sie ihn an die Haut an. Bei Strümpfen mit einem Haftrand sollte die Klebelotion im Bereich unterhalb des Haftrands aufgetragen werden. Bei flachgestrickten Kompressionsversorgungen sollte die Klebelotion in zwei Längsstreifen auf die Haut aufgetragen werden (s. Abb. **C** und Abb. **D**).

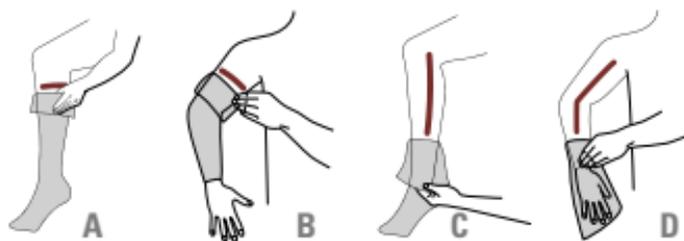

**Anwendungsdauer:** Die Klebelotion ist für den täglichen Gebrauch geeignet.

**Reinigungshinweise:** Reste der Klebelotion lassen sich von der Haut oder dem Strumpf mit Wasser mühelos abwaschen. Zusätzliche Reiniger oder Desinfektionstücher sind nicht erforderlich. Täglich nach dem Ausziehen des Kompressionsstrumpfes entfernen Sie alle Klebereste von Arm oder Bein mit Wasser und waschen Sie die Kompressionsversorgung gemäß den Vorgaben des Kompressionstrumpf-Herstellers.

**BORT Spezial-Hautkleber** ist wasserlöslich, enthält weder Farb- noch Parfümstoffe und hinterlässt keine Rückstände.

**Besondere Hinweise:** Zum Ausziehen kann der Kompressionsstrumpf an den Klebestellen vorab mit einem feuchten Tuch angefeuchtet werden. Dadurch löst sich der Kleber und erleichtert das Ausziehen.

Flüssigkeiten, Schweiß, Hautpflegeprodukte oder Wasseraktivitäten können zu einem Verlust der Haftkraft des Klebers führen, so dass der **BORT Spezial-Hautkleber** möglicherweise erneut aufgetragen werden muss. Die Klebelotion ist nicht für die Klebeverbindung zwischen zwei oder mehr Kompressionsversorgungen konzipiert.

**Kontraindikationen:**

- Entzündete oder nässende Hauterkrankungen (inkl. Neurodermitis)
- Offene Wunden
- Unverträglichkeit auf Inhaltsstoffe

Nicht in Hautbereichen anwenden, die einer medizinischen oder kosmetischen Behandlung unterzogen werden (Nikotin-pflaster, Lotionen, Make-up-Produkte, Parfüm, Haarentfernungscremes/Öle, etc.). Nicht auf Piercings, tätowierte Haut sowie Infusionsschläuche auftragen. Bei Verletzungen oder Unverträglichkeitsreaktionen oder Unwohlsein ziehen Sie den Strumpf aus und reinigen Sie die Haut gründlich mit Wasser. Nicht für andere Zwecke einsetzen, nicht als Deodorant verwenden! Klebelotion nicht in Kontakt mit Augen bringen. Bei Augenkontakt die Augen bei geöffneten Lidern ausreichend lange mit Wasser spülen und Augenarzt aufsuchen. Klebelotion nicht verschlucken. Nach Verschlucken, Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Kein Erbrechen herbeiführen und einen Arzt aufsuchen. Jedes schwerwiegende Vorkommnis, das sich im Zusammenhang mit **BORT Spezial-Hautkleber** ereignet hat, ist dem Hersteller und der zuständigen Behörde Ihres Landes zu melden.



**Sicherheitshinweise:** Halten Sie die Rollkugel bei Anwendung stets sauber. Das Produkt ist nur für die Verwendung durch einen einzigen Benutzer vorgesehen.

Bei einer falschen Dosierung/Anwendung des **BORT Spezial-Hautklebers** kann keine Garantie für die angegebenen Ergebnisse gegeben werden. Kinder und Menschen mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen müssen durch Pflegepersonal oder Angehörige in der Anwendung unterstützt werden. Halten

Sie Rücksprache mit Ihrem Arzt vor der Anwendung, falls Sie Diabetiker sind oder Medikamente einnehmen, die die Hautreaktion beeinflussen können (Glucocorticoide, Antiallergika, topische Immunmodulatoren, etc.). oder Ihre Haut durch Verletzungen, Irritationen, Behandlungen etc. beeinträchtigt ist.

Für eine optimale Haftung ist es empfohlen, die Hautfläche, auf der die Klebelotion aufgebracht wird, vor der Anwendung zu rasieren oder zu enthaaren. Den **BORT Spezial-Hautkleber** nicht direkt nach der Rasur auftragen, um Hautreizungen und -sensibilisierungen zu vermeiden. Nach der Anwendung des **BORT Spezial-Hautklebers** muss der Anwender seine Hände gründlich mit Wasser waschen, um Kleblotionsrückstände zu entfernen.

Wegen Materialalterung kann die Leistungsfähigkeit des **BORT Spezial-Hautkleber** nur für einen begrenzten Zeitraum gewährleistet werden. Das Haltbarkeitsdatum der Klebelotion ist auf der Flasche angegeben. Nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums nicht mehr als Klebelotion verwenden. Bewahren Sie das Produkt ausschließlich in der verschlossenen Originalflasche auf. Die Klebelotion und seinen Behälter der Problemafallentsorgung zuführen. Der **BORT Spezial-Hautkleber** wird nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards hergestellt.